

체외진단의료기기

1. 품목정보

허가(신고)번호	체외 수허 12-2351 호	
품 목 명	종양표지자면역검사시약	
분류번호(등급)	K02080.01 (3)	
모 델 명	μ TASWako AFP-L3 Calibrator Set	
포장단위	용기 등의 기재사항 참조.	
제조번호	용기 등의 기재사항 참조.	
제조연월	용기 등의 기재사항 참조.	
수입원	상 호	아산제약(주)
	주 소	서울특별시 동대문구 청계천로 485
	전화번호	02-3290-5700
	F a x	02-3290-5750
제조원	상 호 (국가)	제조사(본사) : FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation(일본)
		제조사(공장) : FUJIFILM Healthcare Manufacturing Corporation Mie Office(일본) 제조사(공장) : FUJIFILM Healthcare Manufacturing Corporation Mie Office Komono Site(일본)

2. 구성

번호	명칭	세부구성
1	μ TASWako AFP-L3 Calibrator Set	Blank
		CAL 1
		CAL 2
		Blank용 홀더
		CAL 1용 홀더
		CAL 2용 홀더

3. 사용목적

본 제품은 AFP-L3 및 AFP 측정검사의 보정하기 위한 제품으로 μ TASWako AFP-L3 시약키트와 함께 사용한다.

4. 표시치의 설정

본 제품은 National Institute for Biological Standards and Control (NIBSC) Cond : AFP. The 1st International Standard for ALPHAFETOPROTEIN을 1차 표준물질로 하여 μ TASWako AFP-L3로 설정한 AFP-L1 및 AFP-L3의 표시치가 기재되어 있다.

5. 사용방법


그대로 사용한다.
개봉 후에는 되도록 빨리 사용하고, 사용 후에는 건조하지 않도록 밀봉하여 2~10℃에 보관한다.

6. Calibrator의 바코드 관리

μ TASWako AFP-L3 시약 전용 Calibrator Set의 정보를 바코드로 관리할 수 있다. 부속품인 바코드홀더(해당 로트 전용)를 사용하여 Calibrator 정보를 자동으로 입력할 수 있다.

<바코드홀더 사용방법>

아래 그림과 같이 Calibrator를 넣었던 샘플캡*을 이와 상응하는 바코드홀더의 위에 놓는다.

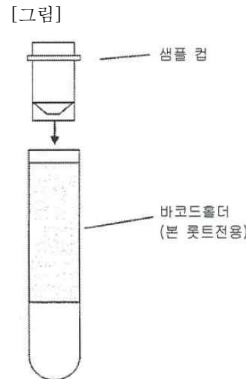

자세한 사항은 μ TASWako i30 사용설명서를 참고한다.

* 바코드 부착홀더에 설치하는 샘플캡은 별도판매구성품(코드 452-00501)이다.

7. 사용 시 또는 취급 시 주의사항

7.1 사용 시 주의사항

- 올바른 결과를 얻지 못할 수 있으므로 로트가 다른 바코드홀더를 사용하지 않는다.
- Calibrator 사용이 끝날 때까지 바코드홀더를 버리지 않는다.
- 본 제품은 본 설명서에 기재된 사용방법에 따라 사용해야 한다. 또한, 측정시약의 사용설명서로 병행하여 참고한다.
- 본 제품은 지정된 조건에서 보관해야 하고 사용기한이 지난 것을 사용하지 않는다.
- 본 제품은 본 설명서에 기재된 사용목적 이외의 목적으로 사용하지 않는다.
- 본 제품의 용기를 다른 목적으로 사용하지 않는다.

7.2 위험방지를 위한 주의사항

- 본 제품이 눈이나 입에 들어가거나 피부에 접촉한 경우 다량의 물로 씻어내고 필요 시 의사의 진단을 받는다.
- 본 제품에는 사람유래성분이 포함되어 있어 바이러스 감염 등의 위험성이 있다. 따라서 검체와 같이 주의해서 취급한다. 또한, 본 제품은 HBs 항원, HIV-1/HIV-2항체 및 HCV항체검사를 실시 하여 음성인 것이 확인되었다.

7.3 폐기 시 주의사항

- 폐기 시 폐기물 처리 및 청소관련 법률(폐기물처리법), 배수기준에 따라 적절한 방법으로 폐기한다.

8. 저장방법 · 사용기간

- 저장방법 : 2~10℃ 보관
- 사용기간 : 제조 후 1년 2개월 간

9. 포장단위

코드번호	제품명	포장단위
464-48101	μ TASWako AFP-L3 Calibrator Set	1Set

10. 별도판매구성품

코드번호	제품명	포장단위
452-00501	샘플캡-S	1,000개