

## ASAN N-Transport Medium (C) 외 1건

### ● 사용목적

- (1) 검체수송배지 : 질병의 진단을 목적으로 검체의 수송 및 보존을 위해서 사용되는 배지

### ● 사용방법

#### (1) 검사 원리

본 제품(검체수송배지 (ASAN N-Transport Medium (H)))은 Virus, Chlamydia, Mycoplasma 또는 Ureaplasma로 인한 감염의 진단 시 사람에서 채취한 검체의 수송 및 보존에 사용한다.

#### (2) 검사 준비 및 저장방법

- 1) 검체준비 : 구강의 타액, 비강의 타액에서 채취한 검체를 검사할 때까지 제품에 보관한다.  
가능한 신속히 검사실로 운반한다.

#### 2) 검사 전 준비사항

- 1- 파손되었거나 오염의 소지가 있는 제품은 사용하지 않는다.  
2- 변색이 된 제품은 사용하지 않는다.

#### 3) 검사과정

- 1- 검체 채취한 면봉을 제품 안에 넣는다.  
2- Cap을 단단히 닫은 후 3-4회 Shaking 하여 검체를 균일하게 한다.  
3- 신속히 검사실로 운반한다.

※ 배양 검사, 항원검사는 할 수 없으므로 사용하지 마십시오.

#### 4) 사용 후의 보관 및 관리방법

- 1- 한 번 사용한 제품은 규정에 맞게 폐기하여야 한다.  
2- 본 제품은 일회용 의료기기이므로 재사용 및 재 멸균해서는 안 된다. ("재사용 금지")

### ● 보관조건 및 저장방법

개봉여부	보관조건	사용기한
미개봉	실온 보존(2-30°C)	제조 후 2년

### ● 포장단위

2mL X 50ea / 1Kit  
20mL X 25ea / 1Kit

### ● 제조번호 및 사용기한

외장(포장박스) 표시사항 참조

### ● 사용상의 주의사항 및 폐기 방법

- 1) 체외진단용으로만 사용합니다.  
2) 본 제품은 전문적인 곳에만 사용됩니다. (전문가용)  
3) 본 제품은 미 개봉상태에서 2-30°C에서 보관해주시시오.  
4) 사용시간이 경과한 제품이나 동결되었던 제품은 품질이 변질되어 정확한 결과를 얻을 수 없으므로 사용하지 마십시오.

- 5) 본 제품은 일회용이므로 재사용하지 마십시오.

- 6) 사용 시 오염 가능성이 없는 곳에서 사용해 주십시오.  
(예. 클린벤치)

- 7) 제품 사용기간을 확인하고, 사용기간이 지난 제품은 사용하지 마십시오.

- 8) 검체는 병원성 미생물일 가능성이 있으므로 취급 시 주의하여 주십시오.

- 9) 모든 임상 검체는 감염성 미생물을 포함할 수 있으니 주의하여 주십시오.

### ● 작성 및 개정연월일

작성연월일 : 2021.09.07      개정연월일 : 2024.02.19

### ● 교환 및 반품

본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품 등은 교환하여 드립니다. 연락처 : 02-3290-5700(대표)/Fax: 02-3290-5750