

MHA 100(BR) (체외진단 의료기기)

● **사용목적**

각종 미생물 염색 시약 및 미생물 배양용 선택·동정 배지, 혈액 배양 배지

● **사용방법**

(1) 검사 원리

항생제 감수성 검사(디스크 확산법)에 쓰이는 배지이다. 카제인과 펩톤은 미생물의 성장을 지지한다. 한천은 고형제이다.

(2) 검사 준비 및 저장방법(검체의 저장방법)

1) 검체는 감염이 있는 바로 그 부위에서 채취해야 하며 인접부위에서 오염 균이 들어가는 것을 막아야 한다.

(3) 검사 전 준비과정

1) 무균처리한 적당한 검체의 채취기구와 용기를 준비한다.

(4) 검사과정

- 1) 접종 시 무균인 곳(예. 클린벤치)에서 멸균된 채취 기구를 사용하여 검체를 채취한다.
- 2) 채취한 검체를 MHA 100(BR) 배지에 접종한다.
- 3) 35°C 인큐베이터 안에서 18hr 배양 후 결과를 판독한다.

(5) 결과판정

- 1) 균이 자랐는지 확인 후, 그 균이 어떤 균 인지 확인한다.
- 2) 판정기준

명칭	ATCC	검 사 기 준	
		Antibiotic disk	Zone Size
<i>E. coli</i>	25922	Amikacin(30µg)	19 - 26
		Aztreonam(30µg)	28 - 36
		Cefotaxime(30µg)	29 - 35
		Ciprofloxacin(5µg)	29 - 37
		Cefoxitin(30µg)	23 - 29
		Cefepime(30µg)	31 - 37
		Gentamicin(10µg)	19 - 26
		Meropenem(10µg)	28 - 35
<i>S. aureus</i>	25923	Ciprofloxacin(5µg)	22 - 30
		Cefoxitin(30µg)	23 - 29
		Clindamycin(2µg)	24 - 30
		Gentamicin(10µg)	19 - 27
		Penicillin(10units)	26 - 37
		Quinupristin-dalfopristin(15µg) Vancomycin(30µg)	21 - 28 17 - 21
<i>P. aeruginosa</i>	27853	Amikacin(30µg)	18 - 26
		Aztreonam(30µg)	23 - 29
		Cefotaxime(30µg)	18 - 22
		Ciprofloxacin(5µg)	25 - 33
		Cefepime(30µg)	25 - 31
		Gentamicin(10µg)	17 - 23
		Meropenem(10µg)	27 - 33

● **정도관리**

1) 사용할 균주

- S. aureus* ATCC 25923
- E. coli* ATCC 25922
- P.aeruginosa* ATCC 27853

2) 사용할 배지

MHA 100(BR) 배지를 냉장고에서 꺼내 Clean Bench에 30분정도 준비한다.

3) 접종균액의 준비

표준균주 균집락을 채취하여 Mueller Hinton Broth 에 풀어 탁도 0.5 McFarland에 맞춘다.

4) 시험 과정

탁도를 맞춘 균액을 채취기구에 묻혀(예.멸균 된 면봉) MHA 100(BR) 배지 표면에 고르게 접종한 후 항생제디스크를 올려 배양한다. 접종 후, 35°C Incubator에서 18hr 배양 후 결과를 확인 한다.

● **보관조건 및 사용기한**

개봉여부	보관조건	사용기한
미개봉	냉장(2-10°C)	제조 후 2개월

● **원재료(성분 또는 특징)**

Peptons	3 g
Casein hydrolysate	17.5 g
Agar	15 g
Ca ⁺	20-25 mg/mL
Mg ⁺	10-12.5 mg/mL

● **사용상의 주의사항 및 폐기 방법**

1. 본 제품은 의료기기이며, 체외진단용으로만 사용합니다.
2. 본 제품은 반드시 냉장 보관 (2~10°C) 해 주십시오.
3. 사용시간이 경과한 제품이나 동결되었던 제품은 품질이 변질되어 정확한 결과를 얻을 수 없으므로 사용하지 마십시오.
4. 사용시 오염 가능성이 없는 곳에서 사용해 주십시오.
(예. 클린벤치)
5. 검체는 병원성 미생물일 가능성이 있으므로 취급시 주의하여 주십시오.
6. **사용 후 폐배지는 멸균 한 후 의료 폐기물 또는 산업 폐기물 등으로 구분하여 처리 해 주십시오.**
7. 측정결과에 기초한 진단은 다른 검사 결과 등과 종합하여 담당 의사가 종합적으로 판단하여 주십시오.
8. **본 제품은 일회용이므로 재사용하지 하지 마십시오.**

● **작성 및 개정연월일**

작성연월일 : 2013년11월21일 개정연월일 : 2024년08월26일

● **포장규격(시약 구성내용)**

MHA 100(BR)	AM708-01	40ea/kit
MHA 150(BR)	AM709-01	40ea/kit

● **교환 및 반품**

본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품 등은 교환하여 드립니다.

연락처 : 02-3290-5700(대표)/Fax: 02-3290-5750



경기도 화성시 동탄대로 725(영천동)

www.asanpharm.co.kr