

Amies 2S

● **사용목적**

검체채취용도구 : 질병 검사 등을 위하여 짧은 시간 안에 구강, 비강, 이강 또는 항문에서 체액, 분비물 등을 채취하는 도구. 면봉 형태 등이 있다.
검체수송배지 : 질병의 진단을 목적으로 검체의 수송 및 보존을 위해서 사용되는 배지

● **작용원리**

가. 검체채취용도구

본 제품은 질병검사 등을 위하여 짧은 시간 안에 구강, 비강, 이강 또는 항문에서 체액, 분비물을 채취하는 도구로 헤드부, 몸통부, 손잡이부로 구성되어 있다.

나. 검체수송배지

본 제품은 세균학적 검사를 위해 검체를 수송, 보존 할 수 있도록 고안된 제품이다.

● **사용방법**

가. 검체 채취용 도구

1. 사용 전 준비사항

- 1) 제품의 포장에 이상이 없는지 확인하고, 파손되거나 개봉된 제품은 사용하지 않는다.
- 2) 제품의 사용기간을 확인하고, 사용기간이 지난 제품은 사용하지 않는다.
- 3) 사용자는 사용방법을 충분히 숙지하고 사용한다.
- 4) 보호 장갑을 착용하여 감염의 위험을 막는다.

2. 사용방법

- 1) 제품을 개봉하고 검체채취용도구를 오염되지 않게 주의하며 꺼낸다.
- 2) 제품의 손잡이 부분을 잡고 검체를 채취하고자 하는 구강, 비강, 이강 또는 항문에서 채취 부는 검체를 채취 하고자 하는 부분에만 접촉되도록 한다.
- 3) 제품의 손잡이 부분을 잡고 면봉 끝으로 손잡이를 가볍게 몇 번 돌리거나 굽어 Tip 헤드부에 검체가 포집되도록 한다. (짧은 시간 안에 구강, 체액, 분비물 등등 검체를 채취)
- 4) 검체 채취가 끝나면 즉시 시료 보관용기에 넣는다.

3. 사용 후 보관 및 관리방법

- 1) 한번 사용된 제품은 반드시 폐기하며, 재사용을 금한다. (본 제품은 1회용 제품임)

나. 검체수송배지

1. 검체준비 및 저장방법

- 1) 검체준비
구강, 비강, 이강 또는 항문 등에서 채취한 검체를 검사할 때까지 제품에 보관한다. 라벨에 해당 정보 입력 후 가능한 신속히 검사실로 운반한다. (즉시 실험실로 보내 24시간 이내에 배양합니다.)

2. 검사 전 준비사항

- 1) 포장에 이상이 없는지 확인하고, 파손되거나 개봉된 제품은 사용하지 않는다.
- 2) 제품포장에 기재된 사용기간을 확인하고 사용기간이 지난 제품은 사용하지 않는다.
- 3) 사용자는 사용방법을 충분히 숙지하고 사용한다.
- 4) 파손되었거나 오염의 소지가 있는 제품은 사용하지 않는다.
- 5) 변색이 된 제품은 사용하지 않는다.

3. 검사과정

- 1) 검체 채취한 면봉을 시약 안에 넣는다.
- 2) Cap을 단단히 닫은 후 Shaking하여 검체를 균일하게 한다.
- 3) 신속히 검사실로 운반한다.

● **보관조건 및 사용기간**

개봉여부	보관조건	사용기간
미개봉	실온(2-30℃)	제조 후 24개월

● **사용 시 주의사항**

가. 검체채취용도구

- 1. 경고
 - 1) 재포장 하지 마십시오.
 - 2) 본 제품은 일회용이므로 재사용 하지 마십시오.
- 2. 일반적 주의
 - 1) 일회용으로 사용합니다. 재사용 시 세균에 감염되거나 잘못된 결과를 이룰 수 있습니다.
 - 2) 환자로부터 검체를 채취할 때, 검체용 도구가 부러질 위험이 있으므로 적당한 압력으로 사용합니다.
 - 3) 모든 검체를 세균에 감염되어 있다고 가정하십시오. 모든 검체를 실험실 규정에 따라 취급하고, 사용 후에는 감염물을 폐기통에 버리십시오.
 - 4) 모든 검사는 Safety Cabinet 혹은 Protective hood에서 진행합니다.
 - 5) 사용기간이 경과한 제품은 사용하지 마시오.
 - 6) 보관조건이 적절치 못하였다면, 검사결과가 정확하지 않을 수 있습니다.
- 3. 사용상의 주의
 - 1) 검체채취용 도구로 검체를 채취할 때, 과잉의 압력이나 힘으로 인하여 몸통부가 부러지지 않도록 주의 합니다.

나. 검체수송배지

- 1) 체외진단용으로만 사용 하십시오.
- 2) 전문가용으로 사용 하십시오.
- 3) 입으로 빨아들이지 마십시오.
- 4) 환자 검체 및 사용한 시약에 대하여 병원성 미생물이 포함될 가능성이 있으므로 취급 시 주의하시기 바랍니다. 의료 폐기물로 폐기되어야 합니다.
- 5) 본 제품은 일회용 이므로 재사용하지 마십시오.
- 6) 제품 사용기간을 확인하고, 사용기간이 지난 제품은 사용하지 마십시오.

● **작성 및 개정연월일**

작성연월일 : 2024년10월16일 / 개정연월일 : -

● **포장 규격(시약 구성내용)**

Kit	50ea
	100ea

● **교환 및 반품**

본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품 등은 교환 하여 드립니다. 연락처 : 02-3290-5700(대표)/Fax: 02-3290-5750



관리번호 : 312898