

L701 TP(체외진단 의료기기)

● **사용목적**

본 제품은 사람의 혈청에서 총 단백질(Total Protein)을 UV rate법(뷰렛반응)으로 정량하는 체외진단분석기용 시약입니다.

● **사용방법**

(1) 검사 원리

검체 중 단백질의 peptide기는 알칼리성 용액 중에서 구리 이온과 결합하여 청색의 구리 착염을 생성합니다. 이 반응에서 발색을 측정하여 총 단백질(total protein)을 구합니다.

(2) 검사 준비 및 저장방법(검체의 저장방법)

- 1) 검체는 정상적인 정맥 혈청에서 분리한 혈청(Serum)을 사용합니다.
- 2) 검체는 실온에서 1주일간 안정합니다.

(3) 검사 전 준비과정

- 1) 해당 장비의 준비과정
BS-220(서울 수신 07-1395호) 장비에 사용을 권장합니다.
- 2) 시약
 - ① 시약 조제가 필요 없고 R-1 그대로 사용합니다.
 - ② 실험 할 제품을 실온에서 꺼내어 각 각 기기 전용 Bottle에 떨어놓고 사용합니다.

(4) 검사과정

- 1) 체외진단의료기기를 이용한 방법
 - ① BS-220(서울 수신 07-1395호)장비에 준비된 본 품의 파라미터 입력하여 확인 후 검체 8μl가 자동적으로 채취되고, 다음 사용액 R-1, 400μl가 자동 유입되어 반응합니다. 이어서 파장 546nm에서 흡광도가 측정됩니다.

(5) 결과판정

- 1) 용법 및 용량은 자동분석기용 기기에 따라 다르므로, 자세한 용법 및 용량은 각 분석기마다 구비된 Parameter를 이용합니다.
- 2) 사전에 설정된 농도 또는 활성치 환산기능에 의해 검체의 TP 활성치를 구합니다.
- 3) **정상 참고치 : 6.5~8.0g/dL**
환자군 및 특정 임상상태에 따라 크게 달라집니다.

(6) 검사의 한계점

- 1) 서 있는 것보다 누워서 채혈할 경우 더 낮게 나타나며, 단시간의 격한 운동은 총 단백질 농도를 6~11% 증가시킵니다.
- 2) 정상인의 경우에도 격한 운동은 장시간 보행, 목욕을 한 후에는 수시뇨에서 단백질이 보입니다. 따라서 수시뇨에서 흔적내지 약 양성 결과가 나오면, 수분섭취, 운동 등의 채뇨조건을 검토하고 3회 이상 재검해야 합니다.
- 3) 측정결과에 기초한 임상진단은 임상증상과 다른 검사결과등과 종합하여 담당의사가 종합적으로 판단하여 주십시오.

(7) 정도관리

정도관리를 실시할때는 타사에서 판매하는 Bio-Rad Lyphochek 1, Lyphochek 2 사용하여 실시합니다.
사용자 칼리브레이션(User calibration)후에 표준곡선(calibration curve)을 점검하기 위해서 매회 수행하고, 정도관리를 위한 정도관리 검체의 데이터가 저장됩니다. 정도관리는 검체 결과의 유효성 보장을 위해서 필수적입니다.

● **보관조건 및 사용기한**

| 개봉여부 | 보관조건 | 사용기한 |
|------|-------------|-----------|
| 미개봉 | 실온(20-25°C) | 제조 후 12개월 |
| 개봉 | 실온(20-25°C) | 개봉 후 1주 |

● **원재료(성분 또는 특징)**

- (1) TP
CuSO₄.5H₂O 1.5g/L
- (2) 제품의 특징
 - 1) 액상시약으로 조제가 편합니다.
 - 2) 안정성과 재현성이 양호합니다.
 - 3) 소포장으로 혼입여부를 최소화 하였습니다.

● **성능**

- (1) 감 도 : 정제수를 시료로 해서 조작한 경우 시약 블랭크의 흡광도는 0.020~0.090의 범위 안에 듭니다.

- (2) 재현성 : 관리 혈청을 10회 이상 동시 측정 시 CV는 3% 이내입니다.
- (3) 직선성 : 직선성은 13g/dL 까지입니다.
- (4) 특이성 : 기지농도의 관리혈청을 측정할 때 농도는 100±5% 이내입니다.
- (5) 검체 중 빌리루빈(≤20mg/dL) 공존 시에도 영향이 없습니다.
- (6) 검체 중 아스코르빈산(≤50mg/dL) 공존 시에도 영향이 없습니다.
- (7) 용혈은 약간의 (+)오차를 유발할 수 있습니다.

● **사용상의 주의사항 및 폐기 방법**

1. 체외진단용으로만 사용합니다.
2. 본 품은 저장 방법에 따라 실온(20~25°C) 보존해 주십시오.
3. 사용기한이 경과한 시약이나 동결된 시약은 품질이 변화되어 정확한 결과를 얻을 수 없으므로 사용하지 마십시오.
4. 자동분석기 적용 시에는 장비의 사용설명서를 참조하여 주십시오.
5. 검체는 간염바이러스나 HIV등의 병원체에 오염이 되는 경우가 있으므로 취급 시 주의하여 주십시오.
6. 검체는 채취 후 신속히 측정하여 주십시오.
7. 시약이 잘못해서 눈이나 입으로 들어갔을 경우나 피부에 닿았을 경우에는 물로 충분히 씻어서 흐르게 하는 등의 응급처치를 하고 필요시 의사의 치료를 받아주십시오.
8. 사용 후 폐액은 폐기물에 관한 규정에 따라 의료폐기물 또는 산업폐기물 등으로 구분하여 처리해 주십시오.
9. 검체에 따라서는 검체중의 목적성분 이외에서 저해반응을 일으키는 경우가 있습니다. 측정치나 측정결과에 의문이 있는 경우에는 재검사나 희석재검사를 통해 확인하여 주십시오.

● **다른 의료기기와 결합하여 사용하는 기종**

- BTR-815,820, BTS-310, CH-100
- CH-100PLUS, CH-300, CL-750,770
- RA-50, HUMANLYZER-2000, HUMAN-850
- HITACHI Photometer-4020, LISABIO
- Prime, Prime-E, SM-400 PLUS
- VITAL-100, ECLIPSE
- ALCYON 300, AUTO-LAB, Keylab
- BS-220, NV-7, ARCO-PC etc.
- BT-2000,3000, COBAS-MIRA
- ELECTA-216E, EXRESS-550,500 PLUS
- HYCELL LISA-200,300,400,500
- PRONTO-E, KUADRO, SELECTRA-1,2
- SABA, SUPER Z818 etc.

● **작성 및 개정연월일**

작성연월일 : 2014년01월08일 개정연월일 : 2020년07월10일

● **포장단위(시약 구성 내용)**

| L701 TP (Biuret법) | 200회용 | L701-4111 | 100mL × 2 |
|-------------------|-------|-----------|-----------|
|-------------------|-------|-----------|-----------|

● **교환 및 반품**

본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품 등은 교환하여 드립니다.
연락처 : 02-3290-5700(대표)/Fax: 02-3290-5750

